

KEN UW SYSTEEM

Aan de slag



Masimo SafetyNet™ Radius T™

Installatie-instructies

Waarschuwing: Voer geen zelfdiagnose of zelfmedicatie uit op basis van de metingen. Raadpleeg altijd uw arts.




Masimo SafetyNet-app

Masimo SafetyNet verzamelt en toont doorlopend gegevens van de gekoppelde draagbare sensor. Deze gegevens worden ook naar uw zorgverlener gestuurd.


Radius T™ Sensor

De sensor wordt gedragen op de borst, meet uw lichaams-temperatuur en stuurt uw gegevens naar de Masimo SafetyNet-app.

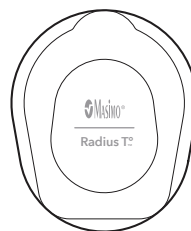


2 Sensor aanbrengen


Controleer voordat u de sensor aanbrengt dat de plek van aanbrenging op de borst vrij van haren, schoon en droog is.

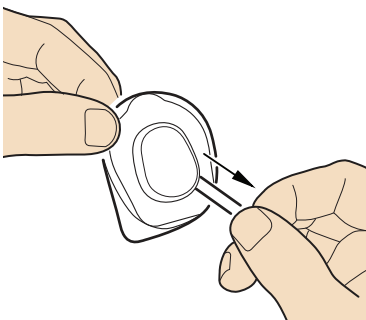

Neem de sensor uit het zakje en trek aan het lipje om de batterij te activeren.

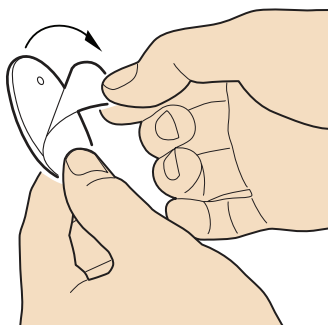

Verwijder de plasticfolie van de achterkant van de sensor.

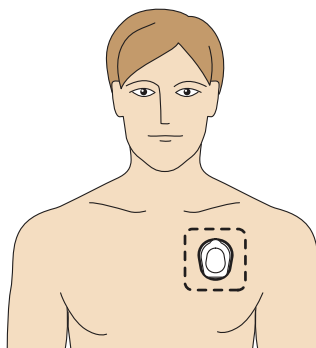


Breng de kleefsensor aan op het bovenste gedeelte van uw borst, onder uw linker sleutelbeen, zoals weergegeven in het diagram.

1

Masimo SafetyNet-app instellen


Volg de aanwijzingen in de uitnodiging die u per e-mail of sms hebt ontvangen om de Masimo SafetyNet-app te downloaden en een account te maken.

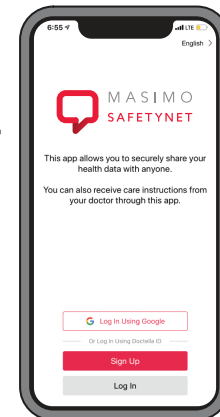

3

Sensor koppelen

Open in **Settings** (Instellingen) in de Masimo SafetyNet-app het menu **Add Device** (Apparaat toevoegen) en volg de aanwijzingen voor het koppelen van de Radius T°-sensor met uw telefoon.

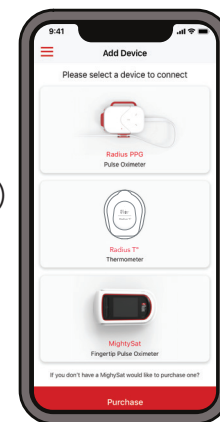


Voor meer informatie, waaronder video's en instructies, kunt u terecht op mymasimo.com

Dagelijkse taken op telefoon


Voorbeeld weergegeven - uw scherm kan er anders uitzien

Start CareProgram™

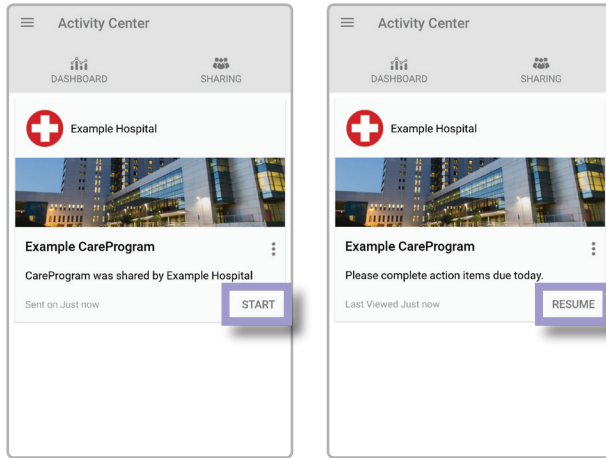

Kies "Start" om uw CareProgram te starten of "Resume" (Hervatten) om verder te gaan waar u eerder was gebleven.


Vragen beantwoorden

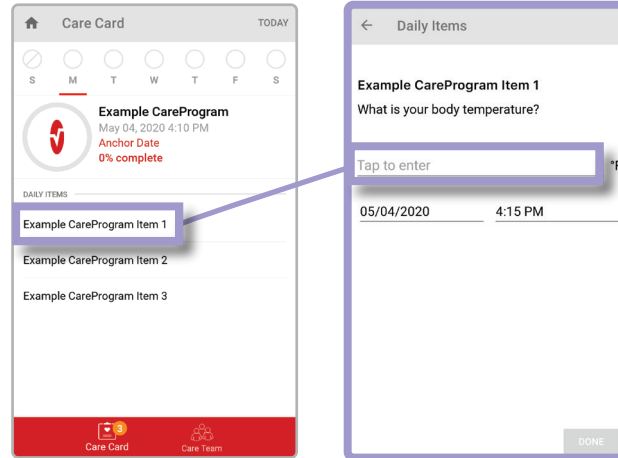

Selecteer elk item onder "Daily Items" (Dagelijkse items) om de vragen van uw zorgverlener te beantwoorden.

Beantwoord de vraag die verschijnt. Herhaal dit totdat u alle "Daily Items" (Dagelijkse items) voor elke dag hebt ingevuld.


Verbinding controleren

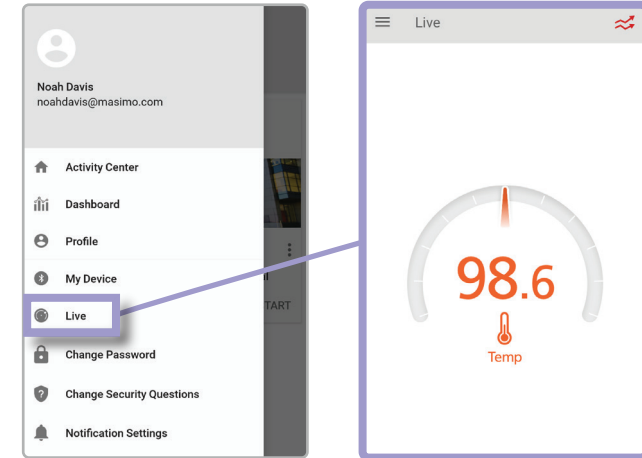


Tik in het Activity Center (Activiteitscentrum) op het pictogram om het menu te openen. Tik op "Live" om de livegegevens van uw sensor te bekijken.

Als uw sensor op de juiste wijze is aangebracht en verbonden, ziet u uw livegegevens met cijfers.

Onderhoud van uw sensor

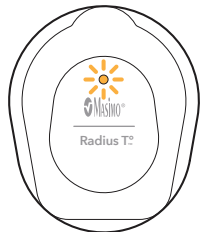

Als het batterijlampje oranje of rood is, is de batterij bijna leeg.

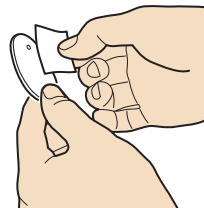

Als het nodig is de sensor te verwijderen en opnieuw aan te brengen, wrijft u het blootgestelde kleefmiddel voorzichtig schoon met een wattenstaafje met alcohol en laat u dit drogen voordat u de sensor weer aanbrengt.



De sensor kan worden gedragen in de douche maar mag niet worden ondergedompeld.